

Kötözési ajánlás járóbeteg intézmények részére

Vénás lábszárfekély

A krónikus sebek kialakulásának okai közül leggyakoribb a **krónikus vénás elégtelenség**, ezért a nagyszámú vénás eredetű lábszárfekély kiemelt figyelmet érdemel a sebkezeléssel foglalkozó szakemberektől. Ebben az esetben a **sebkezelés önmagában nem jelent teljes körű megoldást**. Először a megfelelő pontos diagnózis felállítása a cél, mert csak ezután lehet hatékony terápiás célkitűzést összeállítani. Ha nincs kontraindikáció, akkor a **kompressziós terápiával együttesen végzett sebllátás** ad teljes körű megoldást.



Száraz,
nekrotikus
seb



TenderWet 24
active



Peha-haft



Pütter-pólya vagy
Saphenamed ucV



Fertőzött
seb



Sorbalgon



Zetuvit



Peha-haft



Pütter-pólya vagy
Saphenamed ucV



TenderWet 24
active



Peha-haft



Pütter-pólya vagy
Saphenamed ucV




Fibrin-
lepedék,
ép sebkörnyék



PermaFoam
comfort



Pütter-pólya vagy
Saphenamed ucV

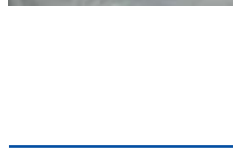

Fibrin-
lepedék,
sérülékeny
sebkörnyék



PermaFoam



Peha-haft



Pütter-pólya vagy
Saphenamed ucV



Feltisztuló,
közepesen
vagy erősen
váladékozó



Sorbalgon



Zetuvit



Peha-haft



Pütter-pólya vagy
Saphenamed ucV



Stagnáló
sarjadzás,
enyhén vagy
közepesen
váladékozó,
macerált
sebkörnyék



Syspur-derm



Peha-haft



Pütter-pólya vagy
Saphenamed ucV

FIGYELMEZTETÉS: oxidáló vagy festék tartalmú szerek és a kötszerek egyidejű használata nem javasolt! A seb öblítését steril 0,9%-os NaCl oldattal végezzük.

HARTMANN





Sarjadzó seb,
közepes
váladékozás,
ép sebkörnyék



PermaFoam
comfort



Pütter-pólya vagy
Saphenamed ucV



PermaFoam



Peha-haft



Pütter-pólya vagy
Saphenamed ucV



Hydrocoll



Pütter-pólya vagy
Saphenamed ucV



Hydrosorb



Peha-haft



Pütter-pólya vagy
Saphenamed ucV



Hydrosorb
comfort



Pütter-pólya vagy
Saphenamed ucV



Hámosodó
seb,
közepes vagy
kevés
váladékozás,
ép sebkörnyék



Grassolind



Zetuvit



Peha-haft



Pütter-pólya vagy
Saphenamed ucV



Atrauman



ES-kompressen



Peha-haft



Pütter-pólya vagy
Saphenamed ucV

A sebkörnyéki
bőr ápolására
és védelmére



Menalind
termékcsalád

A Peha-haft kohezív pólya alternatívájaként a Peha-crepp rugalmas szegett pólya is alkalmazható.



Az ajánlásban szereplő kötszerek és a Pütter pólya OEP támogatással felírható. A Saphenamed ucV nem OEP támogatott termék.

HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.
Tel: 06 23 530-900 Fax: 06 23 530-905
www.hartmann.hu



segít gyógyítani.